

Universalsensor.

Kan for eksempel benyttes som:

- Dør alarm
- Senge alarm
- Passasjevakt
- Innaktivitets alarm

Trådløs
bevegelse
detektor



Bruksområder

Bevegelse detektoren kobles trådløst mot trygghetsalarmene TMA4 og TMA5.

Den kan også kobles mot sykesignalanlegg ved hjelp av en SA301 radiomotaker montert ved trekk-kontakten hos pasienten. SA301 må bestilles i tillegg.

Enheten kan enkelt flyttes mellom pasientrom.

Funksjon

IR-detektoren har en innebygd radiosender. Den registrerer bevegelse foran sensoren.

Ved deteksjon sender den signal trådløst til mottaker.

Detektoren har AV/PÅ knapp. Det finns også en testknapp på baksiden av detektoren. Deteksjonsområdet er ca 12 meter rett foran sensoren.

Under lokket finnes det brytere som man kan stille funksjoner, for eksempel om man vil sette detektoren i gangtest, angi hvor mange pulser som trengs for at alarmen skal utløses.

Man kan også stenge av lysdindikeringen i front om det skulle være forstyrrende.

Batteri

Batteriet er av typen 3.6v AA Lithium.

Detektorens batteri brukes både for drift av sensor og radiosender.

Batterialarm kan sendes når batteriet har lavt nivå.

For å spare batteriet bør detektoren settes i OFF når den ikke er i bruk.

Oppvarmingstiden på detektoren er 90 sekunder.

Radiofrekvens

Den innebygde radiosenderen benytter 869 MHz. Dette er EU sin godkjente frekvens for sosialalarm.



VAKT OG ALARM AS
POSTBOKS 113
BYGDESENTERET
5591 ETNE

TLF: 53771000
FAX: 53771010
firmapost@vaktogalarm.no
www.vaktogalarm.no

FORHANDLER: